

保守点検自主管理チェックリスト

◆歯科用根管長測定器◆

* このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくことをお勧めします。

* 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡下さい。

* 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

歯科用根管長測定器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名	商品名	オサダアピット 11 (EM-S11)	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名	製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
	購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容		合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
測定器本体	乾電池の向きは正しくセットされていますか		合 否			合 否			合 否		
	アルカリ乾電池の同じ銘柄のものを使用していますか		合 否			合 否			合 否		
	乾電池の劣化(液漏れ等)はありませんか		合 否			合 否			合 否		
	乾電池の使用期限は過ぎていませんか		合 否			合 否			合 否		
	プローブ巻取り部一式、中継コード、対極が接続できますか		合 否			合 否			合 否		
	電源スイッチでオン・オフはできますか		合 否			合 否			合 否		
	電池残量表示が 1 メモリになっていませんか		合 否			合 否			合 否		
	チェッカーにて正常動作確認できますか		合 否			合 否			合 否		
	対極とファイルホルダーの金属クリップ部を接触させると液晶パネルの指針が APEX 位置よりも右側に振り切れますか		合 否			合 否			合 否		
プローブ	プローブを引き出すとロックされ、プローブ巻取りスイッチを押すと巻き取れますか		合 否			合 否			合 否		
	プローブの劣化(キズ等)はありませんか		合 否			合 否			合 否		
中継コード	コードの劣化(キズ等)はありませんか		合 否			合 否			合 否		
	ファイルを確実に保持できますか		合 否			合 否			合 否		
	金属クリップの劣化(汚れ、腐食等)はありませんか		合 否			合 否			合 否		
対極	対極の劣化(汚れ等)はありませんか		合 否			合 否			合 否		