

# Maintenance Check List

## 診療機器を快適にご使用いただくために

—長期休暇前に行っていただきたいこと—

長期休暇に入る前にこの作業を行っていただくと、休み明けにスムーズに診療を始めることができます。

(チェック欄)にチェックをしましょう!

### 休み2日前の診療終了後に

#### SPITTOON スピットンのお手入れをする

- ① スピットンにユニットパイプクリーナーの10倍の希釈液を300ml流す
- ② バキュームホース&排唾ホースにユニットパイプクリーナーの10倍の希釈液を各100ml吸わせる

### 休み前日の診療前に

#### SPITTOON スピットンのお手入れをする

- ① スピットンに水を流し、バキュームホース&排唾ホースに水を吸わせる

### 休み前日の診療終了後に

#### HANDPIECE ハンドピースのお手入れをする

- ① 通常通りにタービン・エンジン・エナックなどのハンドピースのお手入れをする(洗浄・注油・滅菌など)

#### SPITTOON スピットンのお手入れをする

- ① イスを最高位まで上昇させる
- ② バキュームホース&排唾ホースに水を吸わせる(500ml以上)
- ③ スピットンの水を1分以上流す(鉢洗いボタンを押すと水が流れます)
- ④ 排水・バキュームのフィルターを掃除する
- ⑤ イスを最低位まで下降させる
- ⑥ スピットンに水を流す(3秒以上)

#### UNIT ユニット本体について

- ① 給排水BOXの電源をOFFにする。水コックがある場合はコックを閉める
- ② シリンジの“W”を押し、ホース内に溜まった水を出す
- ③ ハンドピースホースにキャップをする(キャップがない場合はラップ等でゴミが入らないように包む)
- ④ バーナーのガスコックを閉める
- ⑤ バキュームの手元にあるコックを閉める
- ⑥ 給排水BOXのドレンボタンを押す(3秒間押すことを3回以上くり返して下さい)  
⇒電源・エアコックの確認をする
- ⑦ ユニット全体を清拭する