

# 保守点検自主管理チェックリスト

## ◆デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置◆

\* このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。


医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくことをお勧めします。

\* 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡下さい。

\* 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

提供 製造販売業者  
販売業者

株式会社アクション・ジャパン  
Ⓜ 長田電機工業株式会社

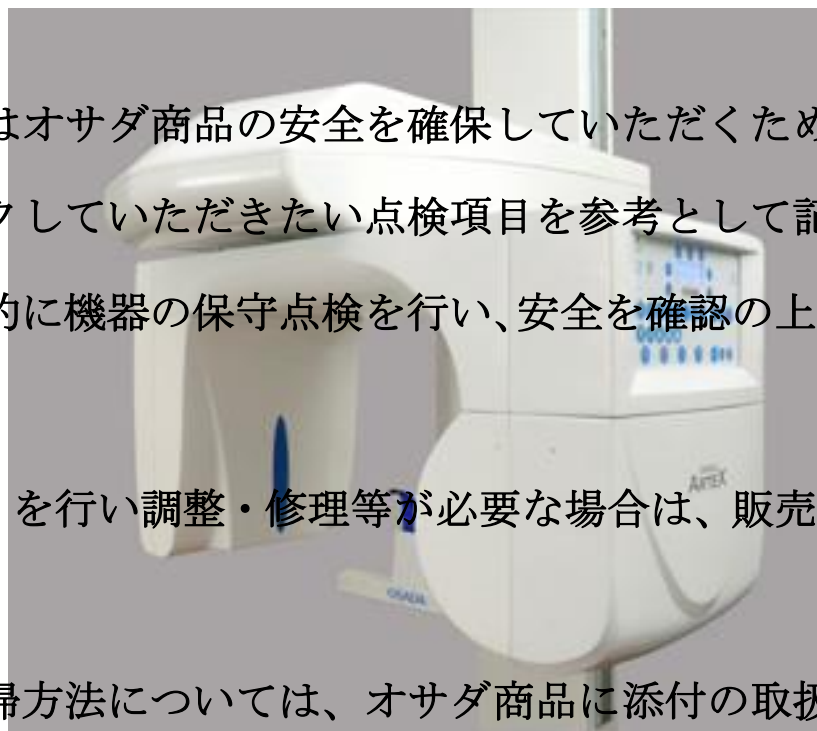

デジタル式歯科用パノラマ・断層 X 線診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

病院名	商品名	OSADA ARTEX シリーズ	点検	実施者	安全管理責任者	点検	実施者	安全管理責任者	点検	実施者	安全管理責任者
院長名	製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
	購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容		合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
電源	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか		合 否			合 否			合 否		
	アースは確実にとられていますか		合 否			合 否			合 否		
本体部	装置は、がたつきがなく安定して設置されていますか		合 否			合 否			合 否		
	ケーブル類に傷、擦れ、引っ張られている箇所はありませんか		合 否			合 否			合 否		
	ケーブルの接続部に緩みはありませんか		合 否			合 否			合 否		
	作動部に干渉するものはありますか		合 否			合 否			合 否		
	各種付属品はスムーズに脱着できますか		合 否			合 否			合 否		
	メインスイッチの動作は正常ですか		合 否			合 否			合 否		
	昇降動作は異常音や、がたつきなどなくスムーズに動作しますか		合 否			合 否			合 否		
	操作パネルは正常に表示されていますか		合 否			合 否			合 否		
	撮影プログラムや照射条件が正常に変更できますか		合 否			合 否			合 否		
	患者位置付け用ビームは正常に機能していますか		合 否			合 否			合 否		
	駆動部のアームの回転は異常音や、がたつきなどなくスムーズに動作しますか		合 否			合 否			合 否		
X 線照射中に X 線照射表示灯が点灯し警告音が出ていますか		合 否			合 否			合 否			
X 線発生器	X 線発生器部より油が漏れていませんか		合 否			合 否			合 否		
照射スイッチ	X 線照射スイッチは照射ボタンから手を離すと同時に照射が止まりますか		合 否			合 否			合 否		
PC 関連	各 PC の設置場所に埃がたまっていますか		合 否			合 否			合 否		
	各 PC の設置場所の換気は充分に行われていますか		合 否			合 否			合 否		
	PC 背面のケーブルの接続に緩みや抜けはありませんか		合 否			合 否			合 否		
総合	シールは剥がれていませんか		合 否			合 否			合 否		
	各固定部に使われているネジに緩みや外れはありませんか		合 否			合 否			合 否		