


保守点検自主管理チェックリスト

◆小型包装品用高圧蒸気滅菌器◆

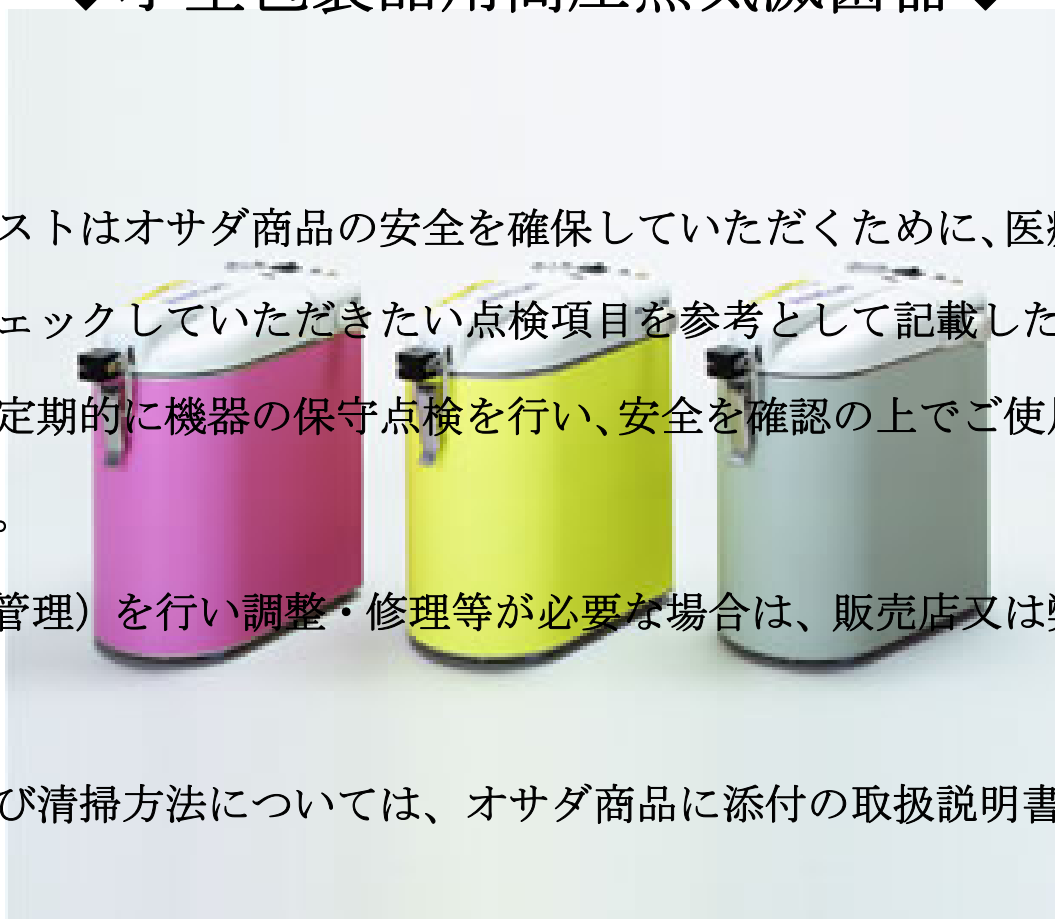


- * このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。
医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくことをお勧めします。
- * 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡下さい。
- * 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

小型包装品用高圧蒸気滅菌器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容			合否	処置		合否	処置		合否	処置	
本体 (缶体を含む)	缶体内に錆、汚れ、摩耗、割れ、変形はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	フタパッキンに汚れ、キズ、割れはありませんか			合 否			合 否			合 否		
	圧力計は使用していないときは"0"を指し、滅菌工程中は設定圧力に達していますか			合 否			合 否			合 否		
配管及び性能部品	使用中、蒸気の漏れ出し音はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	使用中、本体に異常音はありませんか			合 否			合 否			合 否		
電気系統	電源スイッチが正常に動作しますか			合 否			合 否			合 否		
	MAIN ランプ・FINISH ランプが正しく点灯しますか			合 否			合 否			合 否		
	電源コードに劣化(キズ、発熱、変形)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
滅菌性能試験	滅菌は確実にできていますか			合 否			合 否			合 否		

提供

製造販売業者 株式会社 東邦製作所
販売業者  長田電機工業株式会社