

保守点検自主管理チェックリスト

ポータブルレントゲン装置



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

・消耗品の交換及び清掃方法：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供 製造販売業者：デキシコウインジャパン株式会社
販売業者：長田電機工業株式会社

ポータブルレントゲン装置 保守点検自主管理チェックリスト

安全管理責任者：歯科医師、歯科衛生士（主として歯科医業を行う診療所に限る。）

医院名				院長名		点検	実施者	安全管理責任者
商品名	DX3000	・	ADX40000	・	ADX4000W	製造番号	年月日	/ /
	DX3000V							
	ADX4000V-D	・	ADX4000V-L	・	ADX4000V-S	購入年月日	サイン欄	
	ADX4000V3-D	・	ADX4000V3-L	・	ADX4000V3-S			
点検項目		点検内容				合 否	処置	
外観の確認		本体、バッテリーパック、デジタルセンサー、充電器セットに変形、破損、傷やケーブル剥離等の損傷はありませんか。				合 ・ 否		
清浄性の確認		本体、バッテリーパック、デジタルセンサー、充電器セットに、血液等の汚れ、異物付着がなく清浄な状態ですか。				合 ・ 否		
装置の正常状態の確認		電源を入れた際に作動音が聞こえ、正常な初期画面が現れますか。				合 ・ 否		
		タッチパネルならびに操作ボタンを使用して、照射時間等を正常に設定できますか。				合 ・ 否		
		デジタルセンサーを本体に接続後、本体で認識されますか。				合 ・ 否		
		X線照射時に準備音および警告音が正常に鳴り、照射ボタンが点灯しますか。				合 ・ 否		
		バッテリーパックの性能は、適正ですか。 バッテリーパックは消耗品で、使用時間は徐々に短くなります。充電完了後に使用できる時間が半減するなど、劣化が進んだ場合は、新しいバッテリーパックに交換が必要です。				合 ・ 否		
		バッテリーパックの充電時、充電器セットのLED が正常に点灯し、充電できますか。				合 ・ 否		
		異音、異臭は、ありませんか。				合 ・ 否		
装置の固定状態の確認		固定用スタンド（オプション）との取り付けに、問題はありますか。				合 ・ 否		
安全性の確認		X線照射ボタンをX線照射中に離れた際、X線照射が終了しますか。				合 ・ 否		