



保守点検自主管理チェックリスト -歯科用根管長測定器-



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

・消耗品の交換及び清掃方法：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供

長田電機工業株式会社

歯科用根管長測定器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容			合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
測定器本体	プローブ、中継コード、対極が正しく接続できますか			合 否			合 否			合 否		
	電源スイッチでオン・オフはできますか			合 否			合 否			合 否		
	電池残量表示は点灯・点滅していませんか			合 否			合 否			合 否		
	対極とファイルホルダーを触れさせたとき APEX 位置よりも右側に針が振りきれますか			合 否			合 否			合 否		
	アジャストボタンを押すと針「ADJ.」を指し、アジャスト表示は点灯しますか			合 否			合 否			合 否		
	プローブの劣化(キズ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	乾電池の劣化(液漏れ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
中継コード	コードの劣化(キズ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	確実にファイルは保持できますか			合 否			合 否			合 否		
	ファイバーホルダーの金属クリップの劣化(汚れ、腐食)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
対極	対極の劣化(汚れ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		