



保守点検自主管理チェックリスト - 歯科用多目的超音波治療器 -



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

・ 消耗品の交換及び清掃方法：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供

長田電機工業株式会社

歯科用多目的超音波治療器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容			合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
本体	メインスイッチのオン-オフはできますか			合 否			合 否			合 否		
	パワーの設定はできますか			合 否			合 否			合 否		
	パワーは弱くなっていませんか			合 否			合 否			合 否		
	注水量の調節はできますか			合 否			合 否			合 否		
	ボトルの劣化(変形、亀裂等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	ポリウムカバー、ハンドピースレストの劣化(変形、亀裂等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
コネクタ部	各コネクタ部は正しく接続できますか			合 否			合 否			合 否		
電源スイッチ	電源スイッチを入れるとパワーボリューム LED、ボトル LED が点灯しますか			合 否			合 否			合 否		
ハンドピース	ホースと本体の着脱はできますか			合 否			合 否			合 否		
	ハンドピースとホースの着脱はできますか			合 否			合 否			合 否		
	チップは磨耗していませんか			合 否			合 否			合 否		
	チップはきちんと締まりますか			合 否			合 否			合 否		
	水はチップにきちんと当たりますか			合 否			合 否			合 否		
	ライトは点灯しますか			合 否			合 否			合 否		
フットスイッチ	フットスイッチでオン-オフはできますか			合 否			合 否			合 否		
	作動すると本体又はチップから異音がしませんか			合 否			合 否			合 否		