


# 保守点検自主管理チェックリスト

## ◆アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置◆

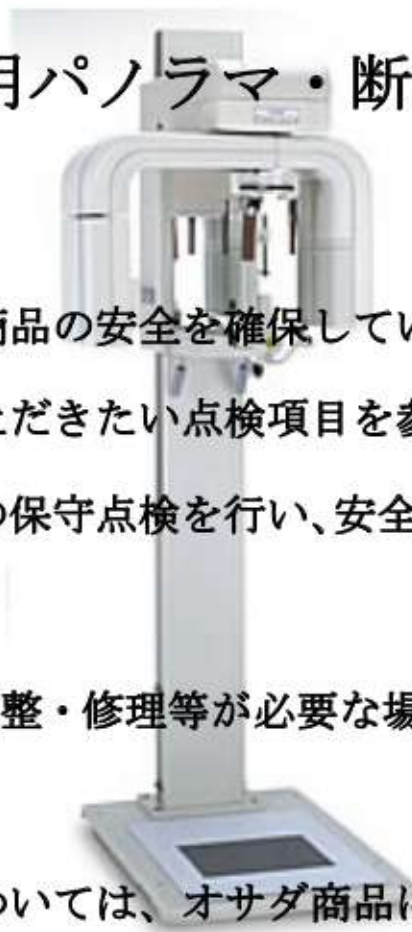

\* このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくこと  
をお勧めします。

\* 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡  
下さい。

\* 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

提供

製造販売業者 株式会社近畿レントゲン工業社  
販売業者 長田電機工業株式会社

アナログ式歯科用パノラマ・断層 X 線診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者			
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /			
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄					
点検項目	点検内容			合 否	処置			合 否	処置			合 否	処置		
電源	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか			合 否				合 否				合 否			
	アースは確実にとられていますか			合 否				合 否				合 否			
本体部	メインスイッチは確実にオン・オフしますか			合 否				合 否				合 否			
	メインフレーム部の上下は正常ですか。又、ストップダイヤルで固定できますか			合 否				合 否				合 否			
	チンレストハンドルでチンレストはスムーズに動きますか			合 否				合 否				合 否			
	チンレスト及びイーアール板の着脱はスムーズにできますか			合 否				合 否				合 否			
	頭部固定ハンドルでの開閉、ロックはスムーズにできますか			合 否				合 否				合 否			
	メインスイッチを入れると操作パネルが正常に表示しますか			合 否				合 否				合 否			
	ノーマル、リセットキーにて回転、停止しますか			合 否				合 否				合 否			
	セットアップキーで駆動部がスタート位置まで回転、停止し READY を表示しますか			合 否				合 否				合 否			
	セットアップキーを押して駆動中、ストップキーで停止しますか			合 否				合 否				合 否			
	ポジションキーを押してライトビームが点灯し、1分後に消灯しますか			合 否				合 否				合 否			
	本体部の頭部固定ハンドルにて kV 表示は 50kV～80kV まで正常に変化しますか			合 否				合 否				合 否			
	マニュアルモードにて、管電圧が変わりますか			合 否				合 否				合 否			
	昇降スイッチは正常に動作しますか(オプション)			合 否				合 否				合 否			
フィルムカセットはセットできますか			合 否				合 否				合 否				
フィルムカセットホルダーはスムーズに動作しますか			合 否				合 否				合 否				

アナログ式歯科用パノラマ・断層 X 線診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

X 線発生器	発生器部より油が漏れていませんか	合 否		合 否		合 否	
室外パネル	ハンドスイッチは正常ですか	合 否		合 否		合 否	
	X線照射中、X線表示灯が点灯しますか	合 否		合 否		合 否	
総合	フィルムは期限切れになっていませんか	合 否		合 否		合 否	
	増感紙にキズや汚れはありませんか。又、古いものは使用していませんか	合 否		合 否		合 否	
	シールは剥がれていませんか	合 否		合 否		合 否	
	各種ビス及びワイヤーの固定に緩みや外れはありませんか	合 否		合 否		合 否	