



## 保守点検自主管理チェックリスト -デジタル式歯科用パノラマ・断層X線診断装置-



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、  
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

・消耗品の交換及び清掃方法：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供 製造販売業者 株式会社近畿レントゲン工業社  
販売業者 長田電機工業株式会社

デジタル式歯科用パノラマ・断層 X 線診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

| 病院名                     | 商品名   | 点検   | 実施者 | 安全管理<br>責任者 | 点検   | 実施者 | 安全管理<br>責任者 | 点検   | 実施者 | 安全管理<br>責任者 |  |
|-------------------------|---|------|-----|-------------|------|-----|-------------|------|-----|-------------|--|
| 院長名                     | 製造番号  | 年月日  | / / | / /         | 年月日  | / / | / /         | 年月日  | / / | / /         |  |
|                         | 購入年月日                                       | サイン欄 | / / |             | サイン欄 |     |             | サイン欄 |     |             |  |
| 点検項目                    | 点検内容  |      | 合 否 | 処置          |      | 合 否 | 処置          |      | 合 否 | 処置          |  |
| 電源                      | 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか                  |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | アースは確実にとられていますか                             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
| 本体部                     | メインスイッチは確実にオン・オフしますか                        |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | メインフレーム部の上下は正常ですか。又、ストップダイヤルで固定できますか        |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | チンレストハンドルでチンレストはスムーズに動きますか                  |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | チンレスト及びイーロット板の着脱はスムーズにできますか                 |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | 頭部固定ハンドルでの開閉、ロックはスムーズにできますか                 |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | メインスイッチを入れると操作パネルが正常に表示しますか                 |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | ノーマル、リセットキーにて回転、停止しますか                      |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | セットアップキーで駆動部がスタート位置まで回転、停止し READY を表示しますか   |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | セットアップキーを押して駆動中、ストップキーで停止しますか               |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | ポジションキーを押してライトビームが点灯し、1分後に消灯しますか            |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | 本体部の頭部固定ハンドルにて kV 表示は 50kV～80kV まで正常に変化しますか |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
| マニュアルモードにて、管電圧が変わりますか   |   | 合 否  |     |             | 合 否  |     |             | 合 否  |     |             |  |
| 昇降スイッチは正常に動作しますか(オプション) |   | 合 否  |     |             | 合 否  |     |             | 合 否  |     |             |  |
| X 線発生器                  | 発生器部より油が漏れていませんか                            |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
| 室外パネル                   | ハンドスイッチは正常ですか                               |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | X線照射中、X線表示灯が点灯しますか                          |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
| 総合                      | シールは剥がれていませんか                               |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |
|                         | 各種ビス及びワイヤーの固定に緩みや外れはありませんか                  |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |      | 合 否 |             |  |