


保守点検自主管理チェックリスト

◆アナログ式口外汎用歯科X線診断装置◆

- * このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。
医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくことをお勧めします。
- * 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡下さい。
- * 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

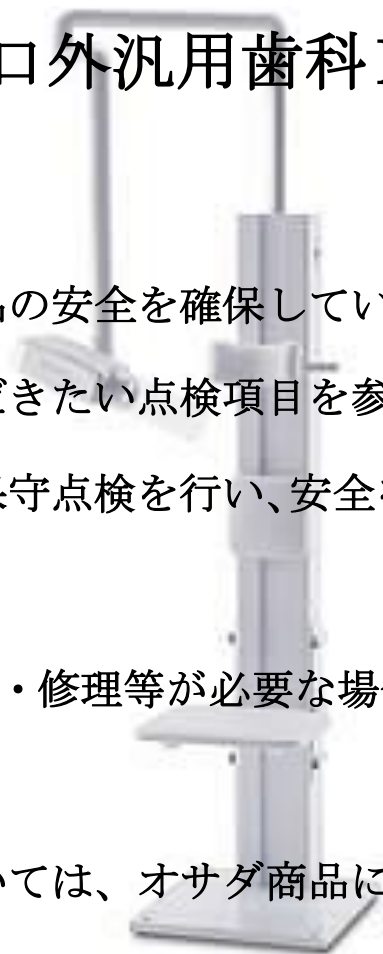

アナログ式口外汎用歯科 X 線診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容			合否	処置		合否	処置		合否	処置	
電源	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか			合 否			合 否			合 否		
	アースは確実にとられていますか			合 否			合 否			合 否		
本体部	メインスイッチは確実にオン-オフしますか			合 否			合 否			合 否		
	昇降支柱の上下はスムーズに動き、任意の位置で停止しますか			合 否			合 否			合 否		
	イスの差し込みがスムーズにでき、ストッパーピンが入れてありますか			合 否			合 否			合 否		
	背当ての上下はスムーズに動き、任意の位置で停止しますか			合 否			合 否			合 否		
	安頭台の上下はスムーズに動き、ロックハンドルの調整は効きますか			合 否			合 否			合 否		
アーム	第1、第2アームの動きがスムーズで、任意の位置で停止しますか			合 否			合 否			合 否		
X線発生器	上下左右の動きがスムーズで、任意の位置で停止しますか			合 否			合 否			合 否		
制御器	電源オン-オフスイッチは正常ですか			合 否			合 否			合 否		
	各選択スイッチで設定が正常に切り替わりますか			合 否			合 否			合 否		
	X線照射中、X線表示灯が点灯し、ブザーが鳴りますか			合 否			合 否			合 否		
	マニュアルモードにて、照射時間が変わりますか			合 否			合 否			合 否		
総合	各固定部に使われているネジに緩みや外れはありませんか			合 否			合 否			合 否		
	シールは剥がれていませんか			合 否			合 否			合 否		
	フィルムは期限切れになっていませんか			合 否			合 否			合 否		