



保守点検自主管理チェックリスト -アナログ式口外汎用歯科 X 線診断装置-



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

・ 消耗品の交換及び清掃方法：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供 製造販売業者 朝日レントゲン工業株式会社
販売業者 長田電機工業株式会社

アナログ式口外汎用歯科 X 線診断装置 保守点検自主管理チェックリスト

医院名	商品名	オサダオーレックス S12X (OX-S12X)	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名	製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
	購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容		合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
電源	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか		合 否			合 否			合 否		
	アースは確実にとられていますか		合 否			合 否			合 否		
本体部	支柱部の上下がスムーズに動き、任意の位置で停止しますか		合 否			合 否			合 否		
	イスの上下がスムーズに動き、任意の位置で停止しますか		合 否			合 否			合 否		
アーム	アーム部の動きがスムーズで、任意の位置で停止しますか		合 否			合 否			合 否		
X線発生器	上下左右の動きがスムーズで、任意の位置で停止しますか		合 否			合 否			合 否		
X線制御器	電源スイッチでオンオフできますか		合 否			合 否			合 否		
	各選択スイッチで設定が正常に切り替わりますか		合 否			合 否			合 否		
	X線照射中、X線照射表示灯が点灯し、ブザーが鳴りますか		合 否			合 否			合 否		
	マニュアルタイマー方式にて、照射時間が変わりますか		合 否			合 否			合 否		
総合	各固定部に使われているネジに緩みや外れはありませんか		合 否			合 否			合 否		
	シールは剥がれていませんか		合 否			合 否			合 否		
	フィルムは期限切れになっていませんか		合 否			合 否			合 否		