



## 保守点検自主管理チェックリスト -小型包装品用高圧蒸気滅菌器-



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、  
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

・消耗品の交換及び清掃方法：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供 製造販売業者 株式会社 東邦製作所 鹿島工場  
販売業者 長田電機工業株式会社

## 小型包装品用高圧蒸気滅菌器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容			合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
本体 (缶体を含む)	缶体内に錆、汚れ、磨耗、割れ、変形はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	フタパッキンに汚れ、キズ、割れはありませんか			合 否			合 否			合 否		
配管及び性能部品	使用中、蒸気の漏れ出し音はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	使用中、本体に異常音はありませんか			合 否			合 否			合 否		
電源	電源コードに劣化(キズ、発熱、変形)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	アースは正確に接続されていますか			合 否			合 否			合 否		
	電源スイッチで ON/OFF できますか			合 否			合 否			合 否		
チャンバ内部	スノコはセットされていますか、ガタツキはありませんか			合 否			合 否			合 否		
	チャンバ内は清掃されていますか			合 否			合 否			合 否		
	水位センサーは汚れていませんか			合 否			合 否			合 否		
	水フィルターは汚れていませんか			合 否			合 否			合 否		
ドア	ドアはスムーズに開閉できますか			合 否			合 否			合 否		
水槽	水槽内は清掃されていますか			合 否			合 否			合 否		
	水量は適当ですか			合 否			合 否			合 否		
	水フィルターは汚れていませんか			合 否			合 否			合 否		
フタパッキン	チャンバと当り面及びフタパッキンの溝部・表面は汚れていませんか			合 否			合 否			合 否		
	損傷やひび割れはありませんか			合 否			合 否			合 否		
	交換時期は過ぎていませんか			合 否			合 否			合 否		
エアーフィルター	汚れていませんか			合 否			合 否			合 否		
	交換時期は過ぎていませんか			合 否			合 否			合 否		