



保守点検自主管理チェックリスト -歯科用ユニット-



このチェックリストは、オサダ商品を安全に使っていただくために、
みなさまにチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。

定期的に機器の保守点検を行ってください。

〈その他の点検はこちらをご覧ください〉

- ・ 日常点検（使用前・使用后点検）：商品に添付の保守・清掃・消毒・滅菌マニュアル
- ・ 消耗品清掃：商品に添付の保守・清掃・消毒・滅菌マニュアル
- ・ 消耗品交換：商品に添付の取扱説明書

※点検を行い、調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡ください。

提供

長田電機工業株式会社

歯科用ユニット 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者				
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /				
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄						
点検項目	点検内容			合 否	処置			合 否	処置			合 否	処置			
無影灯	上下動がスムーズですか。任意の位置で停止しますか			合 否				合 否				合 否				
	左右移動がスムーズですか。任意の位置で停止しますか			合 否				合 否				合 否				
	照度可変ができますか			合 否				合 否				合 否				
	スイッチでオン・オフできますか			合 否				合 否				合 否				
	プロテクターは正しく固定されていますか また、割れや汚れはありませんか			合 否				合 否				合 否				
フィルムビューアー	フィルムは保持できますか			合 否				合 否				合 否				
	スイッチでオン・オフできますか			合 否				合 否				合 否				
給水	給水の水は出ますか			合 否				合 否				合 否				
	水量の調整はできますか			合 否				合 否				合 否				
	温水になりますか			合 否				合 否				合 否				
鉢洗い	鉢洗いスイッチのオン・オフは正常ですか			合 否				合 否				合 否				
	水量の調整はできますか			合 否				合 否				合 否				
患者用いす操作	椅子上下	異音は出ていませんか			合 否				合 否				合 否			
		動きはスムーズですか			合 否				合 否				合 否			
		任意の位置で停止しますか			合 否				合 否				合 否			
		安全スイッチは作動しますか			合 否				合 否				合 否			
	背板寝起	異音は出ていませんか			合 否				合 否				合 否			
		動きはスムーズですか			合 否				合 否				合 否			
		任意の位置で停止しますか			合 否				合 否				合 否			
		チェアロックは作動しますか			合 否				合 否				合 否			
安全スイッチは作動しますか			合 否				合 否				合 否					

歯科用ユニット 保守点検自主管理チェックリスト

点検項目		点検内容	合否	処置	合否	処置	合否	処置
患者用いす操作	チルト上下	異音は出ていませんか	合 否		合 否		合 否	
		動きはスムーズですか	合 否		合 否		合 否	
		任意の位置で停止しますか	合 否		合 否		合 否	
		安全スイッチは作動しますか	合 否		合 否		合 否	
患者用いす操作	トランス前後	異音は出ていませんか	合 否		合 否		合 否	
		動きはスムーズですか	合 否		合 否		合 否	
	椅子回転	異音は出ていませんか	合 否		合 否		合 否	
		動きはスムーズですか	合 否		合 否		合 否	
		任意の位置で停止しますか	合 否		合 否		合 否	
ヘッドレスト	上下動はスムーズですか	合 否		合 否		合 否		
	前後及び角度の調整はスムーズにできますか	合 否		合 否		合 否		
コントロール操作	フット	エアータービン、マイクロエンジンの回転可変ができますか	合 否		合 否		合 否	
		エアータービンチップブローのオン-オフはできますか	合 否		合 否		合 否	
		エアータービン、マイクロエンジンの断続注水はできますか	合 否		合 否		合 否	
ベースマウント式	ワークテーブル オーバーアーム式	エアータービン、マイクロエンジン、超音波スケーラ注水のオン-オフはできますか	合 否		合 否		合 否	
		上下動がスムーズですか。任意の位置で停止しますか	合 否		合 否		合 否	
		左右移動がスムーズですか。任意の位置で停止しますか	合 否		合 否		合 否	
		ワークテーブルに傾きはありますか	合 否		合 否		合 否	
ワークテーブルカート式	ワークテーブル	エアータービン、マイクロエンジン、超音波スケーラ注水のオン-オフはできますか	合 否		合 否		合 否	
		移動がスムーズですか。	合 否		合 否		合 否	
		ワークテーブルに傾きはありますか	合 否		合 否		合 否	
制御本体	エア	元圧は規定範囲内ですか	合 否		合 否		合 否	
	排水	排水の流れは正常ですか	合 否		合 否		合 否	
	水	元圧は規定範囲内ですか	合 否		合 否		合 否	

歯科用ユニット 保守点検自主管理チェックリスト

点検項目	点検内容	合 否	処置	合 否	処置	合 否	処置
高速 エアータービン ハンドピース	バーは抜けませんか	合 否		合 否		合 否	
	上蓋のゆるみはありませんか	合 否		合 否		合 否	
	回転中の異音、振動はありませんか	合 否		合 否		合 否	
	バーの芯振れはありませんか	合 否		合 否		合 否	
	スプレーはバーにきちんと当たっていますか	合 否		合 否		合 否	
	ライトは点灯しますか	合 否		合 否		合 否	
マイクロエンジン	バーは抜けませんか	合 否		合 否		合 否	
	上蓋のゆるみはありませんか	合 否		合 否		合 否	
	回転中の異音、振動はありませんか	合 否		合 否		合 否	
	バーの芯振れはありませんか	合 否		合 否		合 否	
	スプレーはバーにきちんと当たっていますか	合 否		合 否		合 否	
	マイクロエンジンの正逆回転切替はできますか	合 否		合 否		合 否	
	ライトは点灯しますか	合 否		合 否		合 否	
超音波 スケーラ	パワーは可変できますか	合 否		合 否		合 否	
	チップのゆるみはありませんか	合 否		合 否		合 否	
	水はチップ先端にきちんと当たっていますか	合 否		合 否		合 否	
	ライトは点灯しますか	合 否		合 否		合 否	
マルチ シリンジ	エア・水・スプレーはできますか	合 否		合 否		合 否	
	ホットエアになりますか	合 否		合 否		合 否	
	エアに水は混じりませんか	合 否		合 否		合 否	
	ノズルは抜けませんか	合 否		合 否		合 否	
	ライトは点灯しますか	合 否		合 否		合 否	

歯科用ユニット 保守点検自主管理チェックリスト

点検項目	点検内容	合否	処置	合否	処置	合否	処置
可視光線 照射器	可視光線は出ますか	合 否		合 否		合 否	
口腔内バキューム	吸引しますか	合 否		合 否		合 否	
口腔外バキューム	吸引しますか AUTO でインスツルメントと連動しますか	合 否		合 否		合 否	
排唾器	吸引しますか	合 否		合 否		合 否	
エアー	各エアー回路のエアー漏れはありませんか	合 否		合 否		合 否	
水	各水回路の水漏れはありませんか	合 否		合 否		合 否	
電気	メインスイッチのオン・オフは確実に行えますか	合 否		合 否		合 否	
	アースは正確に接続されていますか	合 否		合 否		合 否	
備考							