


保守点検自主管理チェックリスト

◆歯科用根管長測定器◆

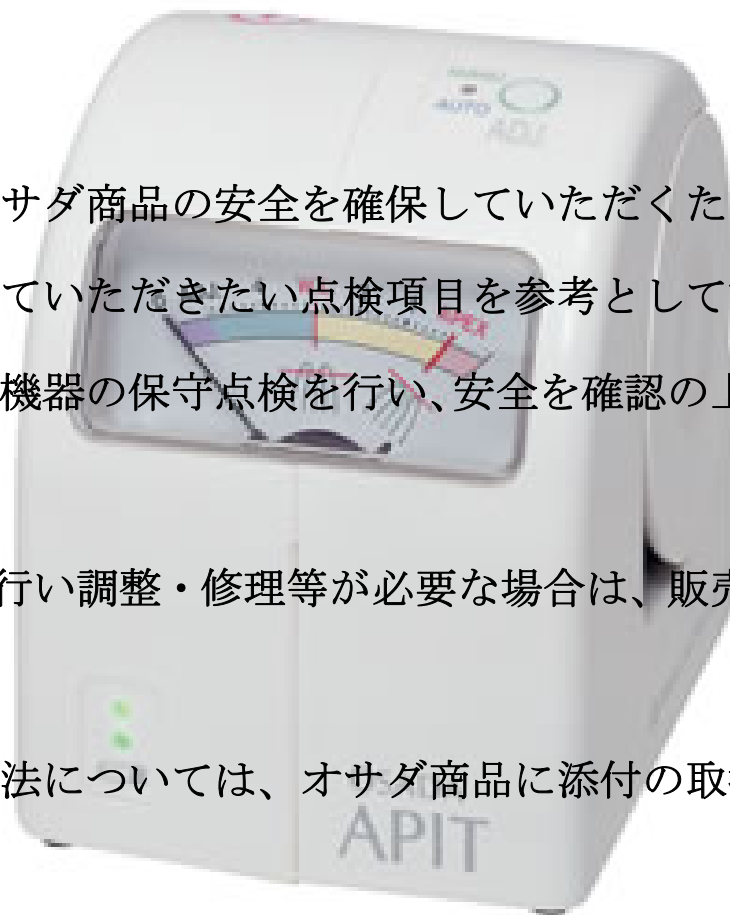

- * このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。
医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくことをお勧めします。
- * 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡下さい。
- * 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

歯科用根管長測定器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目		点検内容		合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
測定器本体	パワースイッチでオン-オフはできますか			合 否			合 否			合 否		
	パワースイッチオンの状態でパワー表示灯は点滅していませんか			合 否			合 否			合 否		
	対極とファイルホルダーを接触させると表示メーターの指針が振り切れま すか			合 否			合 否			合 否		
乾電池ケース	振り切れた状態の時、アジャストボタンを押すと指針はADJを指し、アジャ スト表示灯は緑色に点灯していますか			合 否			合 否			合 否		
	プローブの劣化(キズ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	乾電池の向きは正しくセットされていますか			合 否			合 否			合 否		
	アルカリ乾電池の同じ銘柄のものを使用していますか			合 否			合 否			合 否		
	乾電池の劣化(液漏れ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	乾電池の使用期限は過ぎていませんか			合 否			合 否			合 否		
中継コード	コードの劣化(キズ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
	確実にファイルは保持できますか			合 否			合 否			合 否		
	金属クリップの劣化(汚れ、腐食等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		
対極	対極の劣化(汚れ等)はありませんか			合 否			合 否			合 否		