


# 保守点検自主管理チェックリスト

## ◆歯科重合用光照射器◆

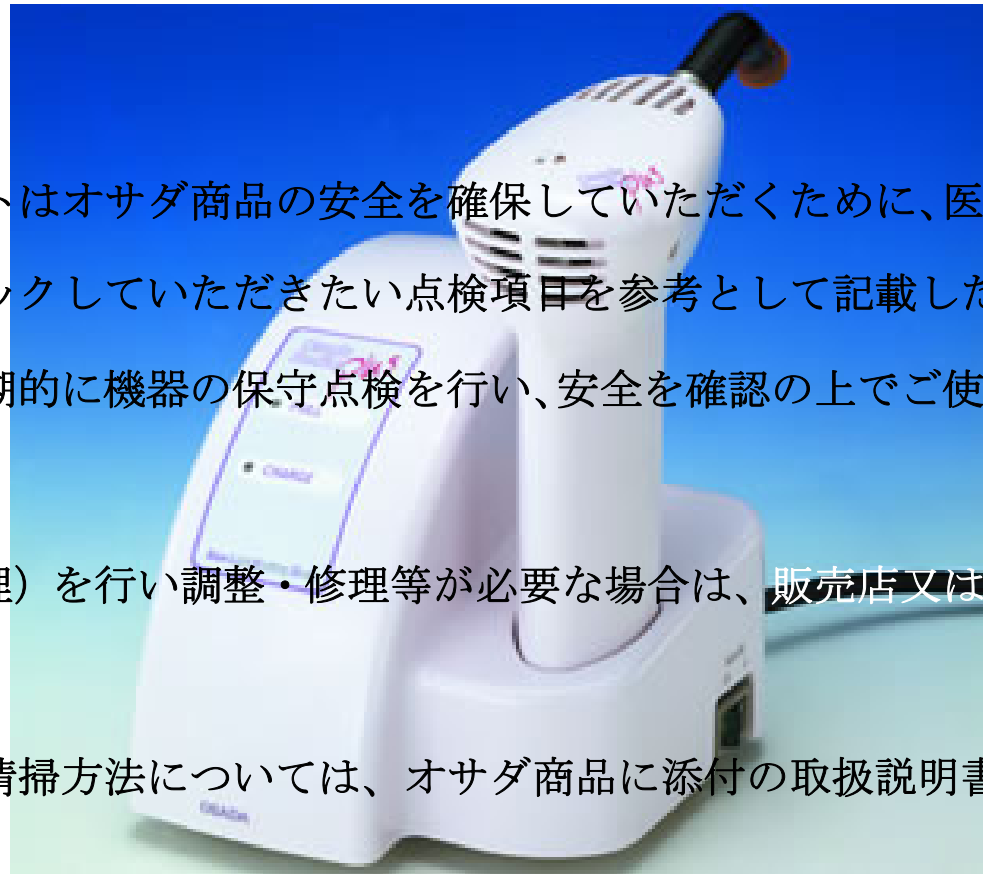

- \* このチェックリストはオサダ商品の安全を確保していただくために、医療機関自らが保守点検を行う上でチェックしていただきたい点検項目を参考として記載したものです。  
医療機関自らが定期的に機器の保守点検を行い、安全を確認の上でご使用していただくことをお勧めします。
- \* 保守点検（自主管理）を行い調整・修理等が必要な場合は、販売店又は弊社営業所へご連絡下さい。
- \* 消耗品の交換及び清掃方法については、オサダ商品に添付の取扱説明書をご参照下さい。

歯科重合用光照射器 保守点検自主管理チェックリスト

医院名		商品名		点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者	点検	実施者	安全管理 責任者
院長名		製造番号		年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /	年月日	/ /	/ /
		購入年月日	/ /	サイン欄			サイン欄			サイン欄		
点検項目	点検内容			合 否	処置		合 否	処置		合 否	処置	
充電器	メインスイッチのオン・オフはできますか			合 否			合 否			合 否		
	ハンドピースをセットした状態で充電中、充電ランプは橙色に点灯していますか			合 否			合 否			合 否		
	ハンドピースをセットした状態で充電完了時、充電完了ランプは緑色に点灯していますか			合 否			合 否			合 否		
ハンドピース	ライトガイドはラインが見えなくなるまで挿入できますか			合 否			合 否			合 否		
	ライトガイドはスムーズに回転できますか			合 否			合 否			合 否		
	ライトガイド先端は汚れたり、欠けたりしていませんか			合 否			合 否			合 否		
	アイガードキャップは取り付けられていますか			合 否			合 否			合 否		
	照射スイッチのオン・オフはできますか			合 否			合 否			合 否		
	照射開始から 10 秒毎にブザー音が鳴り、20秒間照射できますか			合 否			合 否			合 否		
	照射中に冷却ファンは作動していますか			合 否			合 否			合 否		
照射中、バッテリーランプは点灯もしくは点滅していますか			合 否			合 否			合 否			